





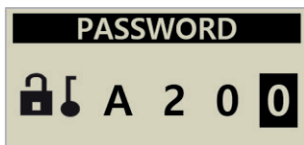
## Auto Setter Dual Kopplungsvorgang mit der Dana-i Insulinpumpe


### 1. Kopplungs-Modus an der Dana-i Insulinpumpe aktivieren


Die Dana-i wird bei folgenden Vorgehen in den Kopplungsmodus wechseln:

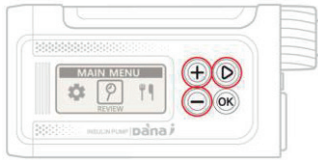

Drücken Sie im HAUPT-MENÜ die drei Tasten    gleichzeitig.




Die Insulinpumpe wird nun ein PASSWORT anfordern, – A200 eingeben und  drücken .

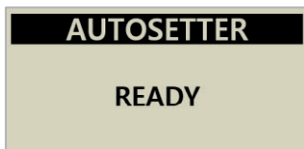


Wie links in der Abbildung dargestellt, wechselt die Pumpe in den Auto Setter Kopplungs- Modus. Der Auto Setter Dual kann mit den nächsten Schritten mit der Insulinpumpe gekoppelt werden.

### 2. Kopplungs-Modus am Auto Setter Dual aktivieren

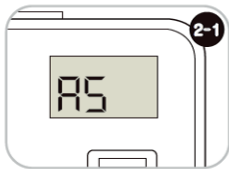


Drücken Sie dauerhaft (ca. 10 Sek.), die Taste am Auto Setter Dual bis **RS** (Bild 2-1) auf dem Bildschirm erscheint. Sie können nun **RS** oder **R** auswählen, indem Sie die Taste drücken.



Wählen Sie bitte **RS** und Halten der Taste so lange gedrückt, bis **Scan** (Bild 2-2) auf dem Bildschirmerscheint. Der Auto Setter Dual sucht anschließend nach einer in der Nähe befindlichen Dana Insulinpumpe, während  das Antennensymbol blinkt.



Hat der Auto Setter Dual eine oder mehrere koppelbare Dana Insulinpumpen ermittelt, erscheinen 4 Zahlen (Bild 2-3) auf dem Bildschirm. Diese Zahl ist der numerische Teil der Seriennummer Ihrer Insulinpumpe. Durch Drücken der Taste können Sie die richtige Seriennummer der Pumpe auswählen.

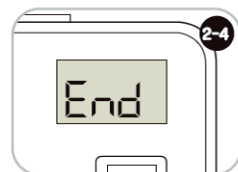

Wenn die Zahl mit Ihrer Dana Insulinpumpe übereinstimmt, halten Sie die Taste so lange gedrückt, bis **End** auf dem Bildschirm (Bild 2-4) erscheint.

**Hinweis** Während des Kopplungsvorgangs dürfen die Insulinpumpe und der Auto-Setter Dual nicht weiter als 6 m entfernt sein.