

Arzt-Menü **DANA R** Insulinpumpe

Im **Arzt-Menü** können zahlreiche persönliche Diabetes-Einstellungen vorgenommen werden. Um Zugriff auf das **Arzt-Menü** zu bekommen, müssen Sie eine entsprechende **PIN-Nummer** (ab Werk=**3022**) eingeben. Sie können auch Ihre persönliche vierstellige **PIN-Nummer** programmieren (Wenden Sie sich hierzu bitte an den Kundenservice).



1) Drücken Sie im **Haupt-Menü** gleichzeitig die **+**, **-** und **▶** Tasten. Anschließend erscheint das **PIN-Menü**.




2) Stellen Sie nun, mit Hilfe der **+**, **-** und **▶** Tasten die **PIN-Nummer 3022** oder Ihre **persönliche PIN-Nummer** ein. Abschließend bestätigen Sie bitte mit **OK**.

3) Das **Arzt-Menü** erscheint.

Drücken Sie **▶**, um auf die verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten zu wechseln. Verwenden Sie bitte **+** oder **-**, um die angezeigten Einstellungen zu verändern.

1. **TAGESZEITEN** (Bolus-Anzeige für Früh / Mittag / Abend) **EIN / AUS**
 2. **MELODIE** (Hinweis nach der Bolus-Abgabe) **0 - 150** (Minuten)
 3. **BOLUS BLOCK** (Bolus-Begrenzung) **0 - 180** (Minuten)
 4. **BOLUS** (Bolus-Erhöhung) **0.05, 0.1, 0.5 oder 1.0** (I.E.)
 5. **BASAL** (Basal-Erhöhung) **0.01 / 0.1** (I.E.)
 6. **ZIEL BZ** (Ziel-Blutzuckerwert in mg/dL oder mmol/L)
 7. **AKTIVES INSULIN** (aktives Insulin von vorherigen Bolus-Abgaben / I.E.)
 8. **INSULIN** (Abbau des verwendeten Insulin in % / Stunde) **0 - 50 %**
 9. **MAX. BASAL** (Maximale Basalinsulin-Menge / Stunde) **0 - 16** (I.E.)
 10. **MAX. BOLUS** (Maximale Bolusabgabe) **0 - 80** (I.E.)
 11. **MAX. TAG** (Maximale Tagesmenge an Insulin) **0 - 300** (I.E.)
 12. **VERSCHLUSS:**
 - L:** Geringe Verschluss-Empfindlichkeit (> 20 I.E. Basalinsulin/Tag)
 - M:** Mittlere Verschluss-Empfindlichkeit (bei 11 - 20 I.E. Basalinsulin/Tag)
 - H:** Hohe Verschluss-Empfindlichkeit (bei 1 - 10 I.E. Basalinsulin/Tag)
 13. **ALARM** (Alarm Code)
 - B:** Batterie / **C:** Check / **D:** Max. Tag / **O:** Verschluss
 14. **EXIT** (Ausgang)
- Drücken Sie abschließend **OK**.

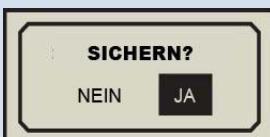

Verwenden Sie bitte **▶**, bis **Ja** unterlegt ist und bestätigen abschließend mit **OK**. Anschließend kehren Sie zurück in das **Haupt-Menü**.